



Je moja krava cyklická? Má tichú ruju?

Predtým ako otestujete, či je vaša krava v ruji mali by ste mať istotu, že je cyklická. Pre spoľahlivé výsledky urobte jednoduchý test s P4 Rapid.

Použite nasledovný postup:

1. Testujte s jednou tyčinkou P4 v tom istom dni v týždni počas 3 týždňov. Zaznamenávajte dátum a číslo kravy na tyčinke a odložte všetky 3 tyčinky spolu.
2. Ak čo i len jedna tyčinka z troch má dve silné čiary tak vaša krava je definitívne cyklická. Určite si zaznamenajte dátum, kedy ste zistili dve silné čiary.
3. Ak žiadna z tyčieniek nevykazuje dve silné čiary, vaša krava nebude cyklická. Prediskutujte tieto výsledky s vaším veterinárom, pretože vaša krava môže byť anovulárna alebo cystická.

Zvyknite si (je to sila zvyku)
Oplatí sa mať istotu.

Testujte váš dobytok s P4 Rapid.

P4
Rapid



Je moja krava v ruji?

Kedy by som mal inseminovať moju kravu?

Ak máte istotu, že je vaša krava cyklická (pozri vyššie) použite P4 Rapid na určenie najvhodnejšieho času na insemináciu.

Testovanie ruje: 17 dní potom ako ste zaznamenali dve silné čiary opakovane testujte pokiaľ sa neobjavia znova dve silné čiary.

Inseminovať môžete v priebehu nasledujúcich 12-24 hodín.
Na čítanie výsledkov testu použite tabuľku nižšie:



	DVE ČIARY ✓	NEZRETELNÉ ?	JEDNA ČIARA ✗
Bučí krava?	ÁNO	NIE Testuj znova o 2 dni	NIE Bučanie je falošné
Je krava v ruji?	ÁNO	NIE Testuj znova o 2 dni	NIE
Je OK pre insemináciu?	ÁNO (Počkej 12 - 24 hod. a potom inseminuj)	NIE Testuj znova o 2 dni	NIE
Prebieha sa (Vrátila sa do cyklu) moja krava 21 dní po inseminácii?	ÁNO	MOŽNO Testuj znova o 2 dni	NIE (Pošli na PD)

Zvyknite si (je to sila zvyku). Testujte váš dobytok s P4 Rapid.
Oplatí sa mať istotu.

P4 Rapid

FARM FEED s.r.o., Piaristická 2, 949 24, Nitra
Kontakt : 0908 178 830 , e-mail: info@farm-feed.eu, www.farm-feed.eu